

Para comenzar, lea este texto primero

ACCU-CHEK® Performa

Guía de Primeros Pasos

Bienvenido a la familia de productos Accu-Chek.



Esta Guía de Primeros Pasos no reemplaza las Instrucciones de uso del medidor Accu-Chek Performa. Observe las advertencias de seguridad en las Instrucciones de uso del medidor.

¡Felicitaciones por tomar la decisión de llevar el control de su diabetes! Esta Guía de Primeros Pasos le ayudará a realizar los ajustes en su sistema y le guiará durante la prueba. Comprobar el funcionamiento correcto de su sistema, realizando pruebas con la solución de control, debe formar parte de su rutina. Para más información, consulte "Realizar pruebas de control" en las Instrucciones de uso. Así mismo, las Instrucciones de uso contienen más información acerca de las funciones adicionales de su sistema y de la interpretación de los resultados de prueba.

1 Introducir el chip de codificación



Asegúrese de que el medidor esté apagado. Dé vuelta el medidor. Dé vuelta el chip de codificación de manera que el número de código se encuentre en posición opuesta a Ud., seguidamente introdúzcalo en la ranura para el chip de codificación hasta que encaje.

CAMBIE EL CHIP DE CODIFICACIÓN CADA VEZ QUE ABRA UN NUEVO ESTUCHE DE TIRAS REACTIVAS.



2 Ajustar la hora y la fecha—Primera puesta en marcha



1. Presione y suelte para encender el medidor. La hora y la fecha aparecen en la pantalla. La palabra "set-up" y la hora parpadean.




disminuir aumentar

2. Para disminuir o aumentar la hora, presione y suelte . Presione y mantenga presionado para desplazarse más rápidamente por sus resultados.



3. Presione y suelte para fijar la hora. Los minutos parpadean.

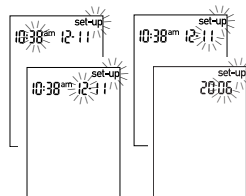

4. Repita los pasos 2 y 3 para ajustar los minutos, am/pm, el día, el mes y el año. La sección que parpadea es la que Ud. está cambiando.



5. Una vez ajustado el año, presione y mantenga presionado hasta que aparezca el símbolo de la tira reactiva parpadeando.

Nota: Su nuevo medidor viene de fábrica con la pila puesta y la hora y la fecha actuales ajustadas. Es posible que Ud. deba cambiar la hora de acuerdo con su zona de horario. Es importante que la hora y la fecha estén ajustadas correctamente en su medidor si usa la memoria del medidor o si desea transferir sus resultados a una computadora.

3 Realizar una prueba de glucemia



1. Prepare el dispositivo de punción.
2. Lávese las manos y séquelas. Extraiga una tira reactiva del tubo de tiras reactivas. Cierre bien el tubo.



3. Introduzca la tira reactiva en el medidor en el sentido de las flechas. El medidor se enciende.




4. Asegúrese de que el número de código de la pantalla concuerde con el del tubo de tiras reactivas. Si no llega a ver el número de código, extraiga la tira reactiva e introdúzcala de nuevo.



5. Cuando parpadee la gota de sangre, obtenga una gota de sangre de la yema del dedo. Para realizar una prueba con sangre de un sitio alternativo, vea las Instrucciones de uso.




6. Apriete ligeramente su dedo para estimular el flujo de la sangre. Esto ayuda a obtener una gota de sangre.

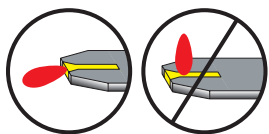

7. Toque el borde delantero de la ventana amarilla de la tira reactiva con la gota de sangre. No aplique sangre encima de la tira reactiva.



8. El símbolo parpadeando indica que hay suficiente sangre en la tira reactiva. Si ha aplicado la sangre, pero el símbolo no parpadea, puede volver a aplicar sangre en el espacio de cinco segundos.

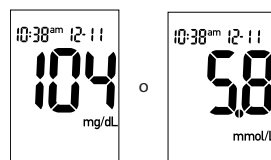

9. Una vez que aparezca el resultado, deseche la tira reactiva usada.



PRODUCTOS ROCHE, S.A. DE C.V.
Av. Isidro Fabela Nte 1536-B,
Toluca, Edo. De México
C.P. 50030

ACCU-CHEK and ACCU-CHEK PERFORMA are trademarks of Roche. Made in U.S.A. ©2006 Roche Diagnostics. All rights reserved. 04877101001-1006

